




COMPRESSANA
EASY Ärmel
Anziehhilfe




Einfaches Anziehen von Kompressionsärmeln

Die Verwendung eines COMPRESSANA Gummihandschuhes vereinfacht das Anlegen des Ärmels erheblich. Durch griffige Handinnenflächen und einer besonderen Oberflächenstruktur kann das Gestrick etappenweise nach oben gestreift werden.


Ebenso einfach können Sie mit diesen Spezialhandschuhen den Sitz des Ärmels nachträglich korrigieren oder Falten und Verdrehungen beseitigen. Zudem wird der Ärmel beim Anziehen vor Beschädigungen (z.B. durch scharfkantige Fingernägel oder Schmuck) geschützt.

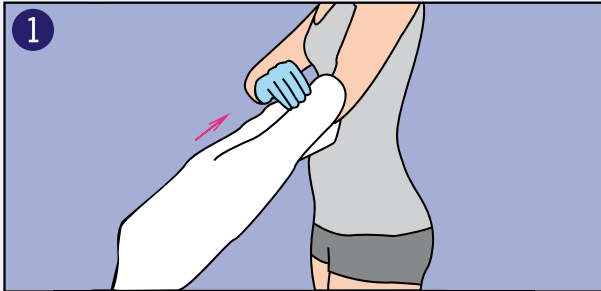


1 Schlüpfen Sie mit dem Arm in die EASY ÄRMEL Anziehilfe.

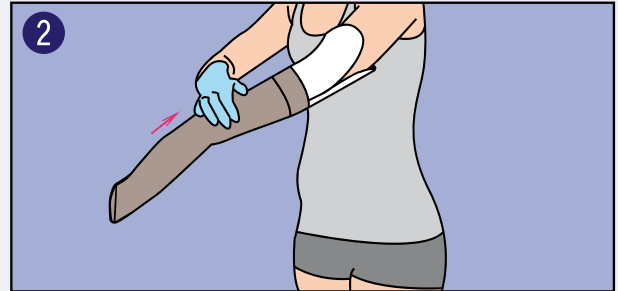

2 Ziehen Sie den Kompressionsärmel über das gleitfähige Material der Anziehilfe EASY ÄRMEL.

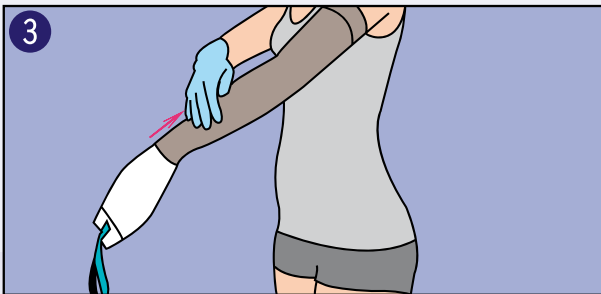

3 Streifen Sie nun den Kompressionsärmel weiter über die Anziehilfe auf Ihren Arm. Sorgen Sie dabei für die exakte Positionierung des Ärmels und für einen faltenfreien Sitz ohne Überdehnungen.

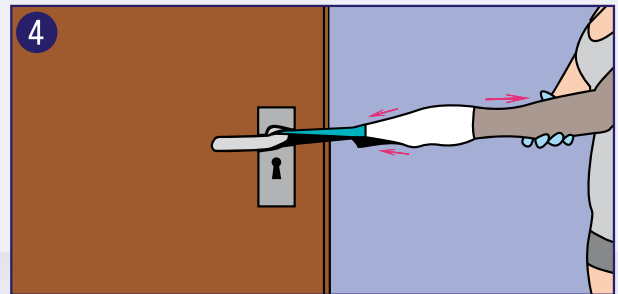

4 Ziehen Sie mit der Schlaufe die Anziehilfe unter dem Kompressionsärmel heraus. Hängen Sie dazu die Schlaufe an einem fest stehenden bzw. sicher befestigten Objekt (z.B. an einem Türgriff) ein.


Nützliche Tipps

Lassen Sie Ihren Kompressionsärmel in regelmäßigen Abständen, spätestens nach sechs Monaten, in Ihrer Apotheke oder Ihrem Fachgeschäft kontrollieren.

Verwenden Sie die hautfreundliche **COMPRESSANA Klebelotion** zur Befestigung und zum Schutz vor Verrutschen. Die Klebelotion kann auf der Haut in allen Bereichen angewandt werden, die vom Gestrick abgedeckt sind. Bei Haftbändern nicht im Bereich der Silikonbeschichtung auftragen.



Die Therapie bei Lymphödem an Arm und Handrücken wird durch die Lagerungshilfe **COMPRESSANA Lymphkissen** unterstützt. Durch Hochlagerung und Entlastung des Arms kann der Lymphabfluss optimal unterstützt und Schwellungen und Schmerzen verringert werden. In Kombination mit Lymphdrainage und Kompressionstherapie wird die Mobilität gefördert und der Therapie- und Rehabilitationszeitraum verkürzt. Durch innovative und hochwertige Materialien und Gestaltung ist die Anwendung auch nachts, während des Schlafs bzw. über längere Zeiträume z.B. am Arbeitsplatz möglich.

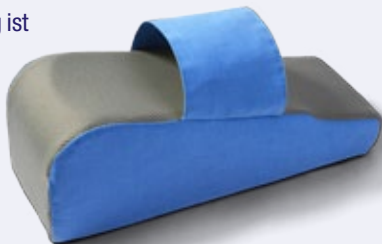

COMPRESSANA GmbH
Böhmerwaldstraße 3 · D-93073 Neutraubling
Tel.: 09401 9226-0 · Fax: 09401 9226-20
info@compressana.de · www.compressana.de